

## 5) A E Dの電源を入れる



電源を入れた後は  
音声メッセージで案内されます。

## 6)電極パッドを患者の胸に貼る

カードリッジから電極パッドを取り出し、表面に描かれている位置に貼ります。



『絵の通りにパッドを貼ります。』




パッドが貼られると  
自動的に解析が始まります。

## 7)解析



『身体に触れないでください。解析中です。』

心電図が自動的に解析され、除細動が必要であれば点滅しているオレンジのボタンを押すように指示がでます。

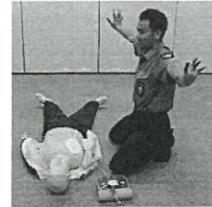

## 8)除細動を行う ショックボタンを押します。




『ショックが必要です。身体から離れてください。点滅しているオレンジのボタンを押してください。』

自動的にエネルギーが充電され、**オレンジのボタンが点滅**します。

### ※ショック実施前に必ず確認してください

- 声を出して、周囲の人が患者から離れるよう指示します
- 手振りでも患者から離れるように指示します
- 患者の身体に誰も触れていないのを確認します

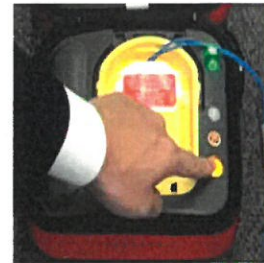

## 9)パッドを貼ったまま直ちに胸骨圧迫を再開する

電気ショックを行った後、何らかの応答や目的のある仕草（嫌がるなどの体動）、あるいは救急隊が到着し引継ぐまで胸骨圧迫を続けます。

2分間の心肺蘇生の後にA E Dが再度心拍を解析し、除細動が必要かどうか指示します。

※患者の状態が変化すると、A E Dが反応します。

## 10)救急隊に情報を伝える

救急隊が到着したら、以下の項目を伝えましょう

- ・患者が倒れた時の状況
- ・容態の変化
- ・応急手当の内容
- ・電気ショックの回数

「i」インフォメーションボタンを押すと、心肺蘇生法を補助する音声ガイド（C P Rコーチング機能）を聞くことができます。



※YouTubeのALSOKチャンネルで心肺蘇生法の説明動画を公開しております。ぜひご利用ください。  
URL : <https://www.youtube.com/watch?v=jqnxtvliTCg>



**ALSOK**

〒107-8511  
東京都港区元赤坂1-6-6  
<http://www.alsok.co.jp/>



● 販売店/お問い合わせ

A L S O K 岡崎支社

電話 : 0564-22-4597



Ver2.0